


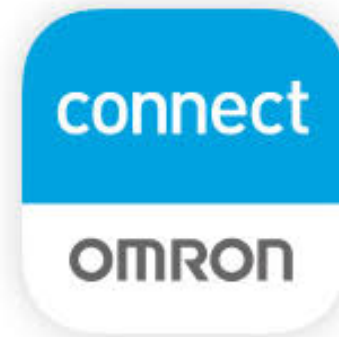

OMRON connect

設定ガイド

OMRON connectアプリ 初期登録手順 <iPhone>

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと連携設定する前に、OMRON connectアプリとiOSヘルスケアアプリの設定が必要です。


1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重体組成計を設定する



2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューより、「コンテンツ」>「+コンテンツ追加」をタップし、ヘルスケア連携の「連携設定」をタップ

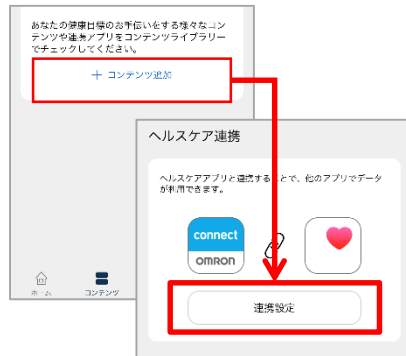


3 OMRON connectとヘルスケアの連携①

「同意する」を選択、iOSヘルスケアに連携させたいデータを「ON」に変更し、「許可」をタップ
※設定済の場合などは、手順 4 に遷移します。そのままお進みください。
※ 2 の画面にもどった場合は、再度「連携設定」をタップし 4 にお進みください



4 OMRON connectとヘルスケアの連携②

「ヘルスケアヘータを書き込み」をONにし「全データ書き込み」をタップ、書き込み許可のダイアログで「OK」を選択
※全データの書き込みを許可しなかった場合、ヘルスケアにデータが送られません

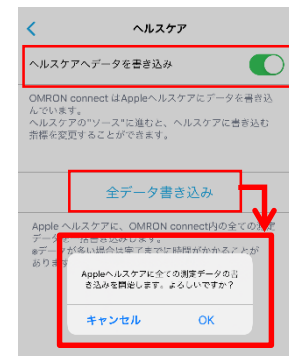

5 OMRON connectとヘルスケアの連携③

全データ書き込みが開始し、「書き込み完了」となったら「閉じる」をタップし、ホームに戻る



6 RenoBodyアプリの設定

RenoBodyアプリMENU> デバイス設定で「OMRON connect」または「iOSヘルスケア」に変更し「設定する」をタップ


※「OMRON connect」選択時は、iOSヘルスケア経由で「OMRON connect」のデータのみを取得
※「iOSヘルスケア」選択時は、ヘルスケアに設定されているデータソース（OMRON Connect 以外も含む）がヘルスケアで統合されたデータを取得



7 RenoBodyとiOSヘルスケアの連携

すべてのカテゴリを「ON」、またはデータ連携する項目を選択し、「許可」をタップ

※設定済の場合などは表示されません

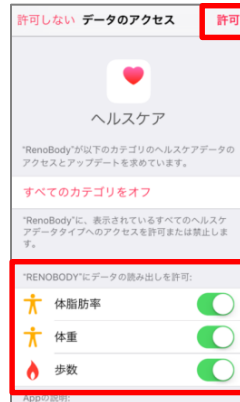

8 設定完了

設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。

活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリ、およびiOSヘルスケアアプリに歩数が同期されていることを確認後、RenoBodyを起動し歩数を更新してください。

OMRON connectアプリ 初期登録手順 <Android>

OMRON connectをご利用の場合は、RenoBodyでOMRON connectと連携設定する前に、OMRON connectアプリの設定が必要です。


1 OMRON connectアプリの設定

画面の案内に従い、活動量計・体重体組成計を設定する



2 OMRON connectアプリ連携設定

OMRON connectアプリメニューより、「コンテンツ」>「+コンテンツ追加」をタップし、アプリ連携の「連携アプリ・サービス」をタップ

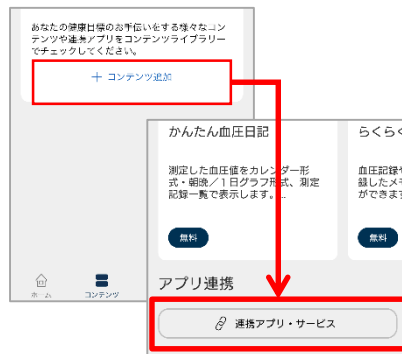

3 OMRON connectとRenoBodyの連携①

「RenoBody(GooglePlay版)」をタップ




4 OMRON connectとRenoBodyの連携②

データの共有を「ON」にする



5 OMRON connectとRenoBodyの連携③

「同意する」をタップ

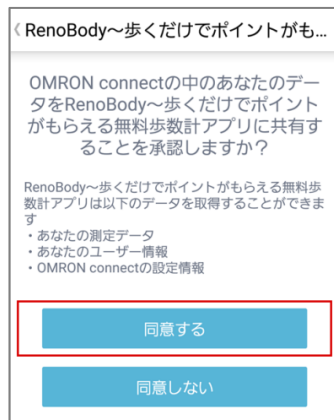

6 RenoBodyアプリの設定 歩数データ連携


RenoBodyアプリMENU>デバイス設定で「OMRON connect」を選択し、「設定する」をタップ



7 RenoBodyアプリの設定 体重データ連携

<体重データを連携する場合>

RenoBodyアプリMENU>デバイス設定画面を下にスクロールし、体重連携設定の「OMRON connect」をチェックし、「設定する」をタップ

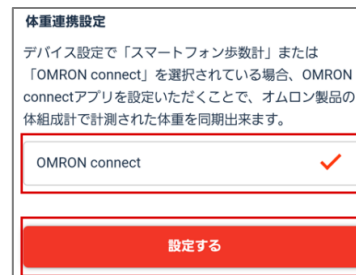

8 設定完了

- 設定完了後より計測したデータがRenoBodyに反映します。
※設定前に計測されたデータは反映しません。
- 活動量計の歩数は、RenoBodyに自動で反映しません。

OMRON connectアプリに歩数が同期されていることを確認後にRenoBodyを起動し、歩数を更新してください。