



Google Health (Fitbit) 設定ガイド

【Fitbitアカウントをお持ちの方】Googleアカウントへの移行手順

過去に作成したFitbitアカウントを、Googleアカウントへ統合します。Googleアカウントが必要です。

※Googleアカウントをお持ちでない方は、事前に作成してください（RenoBodyアカウントの登録情報と同じでなくて構いません）。

1 Google Health (Fitbit) アプリインストール

「Fitbitでログイン」をタップし、
お持ちのFitbitアカウントで
「サインイン」します

過去に作成した
Fitbitアカウント
を入力

fitbit
サインインする

Eメールアドレス
アカウントのEメールアドレス

パスワード

安全なパスワードを入力してください

パスワードを忘れた場合

サインインする

2 アカウント移行

移行未完了のメッセージが表示
されるため、手順に沿って進みます



3 Googleアカウント選択

Fitbitアカウントとして利用する
Googleアカウントを選択します



4 設定確認①

Fitbitの設定を確認します
内容確認は「管理」をタップ
設定を全て確認したら「続行」します



5 設定確認②

現在接続されているアプリと
通知設定を確認します
(未連携時には、ここにRenoBodyは
表示されません)




6 データ利用同意

GoogleがFitbitデータをどう利用
するか確認、同意します



7 調査依頼への同意～完了

調査に関する協力依頼を
確認した後に同意し、移行完了です

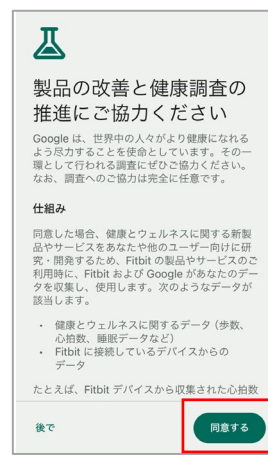


【Google Health (Fitbit) アプリを初めて利用する方】初期登録手順

Google Health (Fitbit) アプリ をご利用の場合は、Googleアカウントが必要です。

※Googleアカウントをお持ちでない方は、事前に作成してください（RenoBodyアカウントの登録情報と同じでなくて構いません）。


1 Google Health (Fitbit) アプリインストール

アプリを起動し、お持ちのGoogleアカウントでログインします

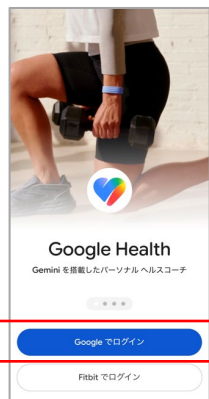

2 プライバシーについて

プライバシーに関する記載を確認のうえ選択してください

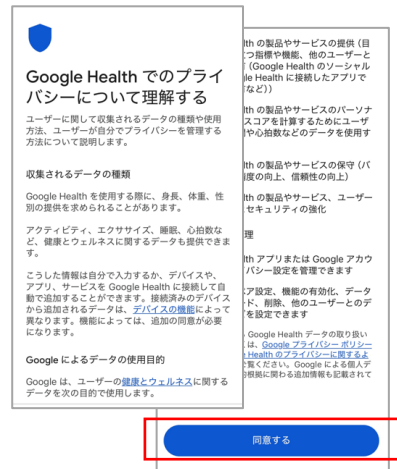


3 プロフィール情報入力

体重・身長・性別を入力します




4 データの使用について

研究開発目的でのデータの使用許可（任意）について確認のうえ選択してください

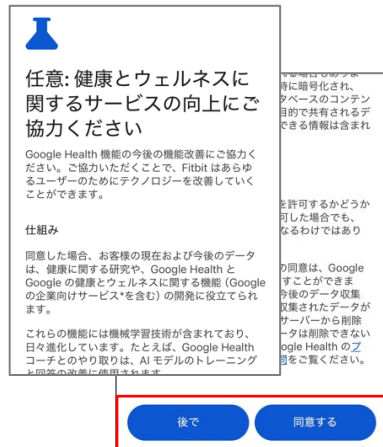

5 案内について

Google Healthからの案内（メール）を受け取るかどうか選択

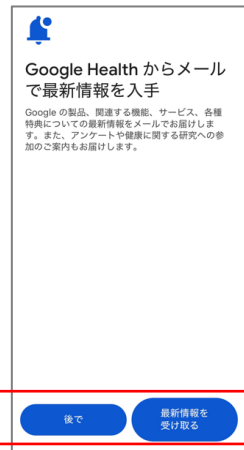

6 記録デバイスを選択

「Fitbitスマートウォッチ…」をタップし、お持ちのFitbitデバイスを選択



7 Fitbitデバイスを接続

案内に沿って、Fitbitデバイスを接続してください。
※スマートフォン端末のBluetoothをオンにする必要があります。



8 設定完了

接続できれば設定完了です。
※左上のマークから、接続状況やデバイスの設定をご確認いただけます。

